



Státní
veterinární
správa

**OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ NA
AFRICKÝ MOR PRASAT (AMP) A KLASICKÝ MOR PRASAT (KMP)
U PRASETE DIVOKÉHO**

(kusy nalezené a usmrcené dopravním prostředkem v uzavřeném pásmu I)

KVS SVS / pracoviště:

Pro SVÚ:

1. OBJEDNÁVKA VYŠETŘENÍ NA: uhynulá KMP kód Epl150, Epl151 AMP kód Epl405, Epl415
sražená KMP kód Epl152, Epl153 AMP kód Epl405, Epl415

2. OBJEDNAVATEL / ŽADATEL / NÁLEZCE:

Jméno a příjmení:	
Firma / společnost:	
Ulice, č.p.:	Obec:
PSČ / Okres:	Telefon:
E-mail:	Č. účtu:

3. MÍSTO NÁLEZU:

Název honitby:	KÚ číslo:
Obec:	PSČ:
Reg.č.honitby: C Z	Okres:
GPS:	Lokalita / název místa:

4. IDENTIFIKACE NALEZENÉHO KUSU (vhodné zaškrtněte):

Datum nálezu	Pohlaví: samec <input type="checkbox"/> ♂ samice <input type="checkbox"/> ♀ nelze identifikovat <input type="checkbox"/>
Kategorie	sele <input type="checkbox"/> lončák <input type="checkbox"/> bachyně <input type="checkbox"/> kňour <input type="checkbox"/>
Hmotnost (kg)	1-10 <input type="checkbox"/> 10-20 <input type="checkbox"/> 20-40 <input type="checkbox"/> 50-75 <input type="checkbox"/> >75 <input type="checkbox"/>
Stav kadáveru	1. Čerstvý neporušený kadáver <input type="checkbox"/>
	2. Nadmutý neporušený kadáver <input type="checkbox"/>
	3. Biochemicky aktivní rozklad (rozklad orgánů) <input type="checkbox"/>
	4. Pokročilý rozklad (rozklad zbytků orgánů, čpavkový zápach) <input type="checkbox"/>
	5. Vysychání zbytků měkkých tkání <input type="checkbox"/>
	6. Kosterní zbytky (pouze kosti, zbytky chrupavek, vaziva a zbytky kůže) <input type="checkbox"/>

5. ODEBRANÝ VZOREK:

Barva / krev <input type="checkbox"/>
Jiné vzorky: slezina <input type="checkbox"/> , ledvina <input type="checkbox"/> , mízní uzlina <input type="checkbox"/> , dlouhá kost <input type="checkbox"/> , jiný:
Pírko ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>



DOPORUČENÝ POSTUP ODBĚRU VZORKŮ NA AMP / KMP (odběrová souprava)

Při odběru vzorků vždy použijte jednorázové ochranné rukavice!

- 1) Jako vzorek k vyšetření AMP či KMP odeberte **barvu/krev** a to do přiložené stříkačky. Po nasátí krve odlomte píst a stříkačku uzavřete přiloženou plastovou čepičkou.



- 2) Pokud nelze odebrat krev, odeberte **část orgánů** (slezina) do přiložené uzavíratelné plastové vzorkovnice.



VZORKOVNICE / KONTEJNER
NA ORGÁNY

- 3) V případě nemožnosti odebrat krev či orgány/tkáně, je nutné odebrat **dlouhou kost**.

Odebrané vzorky vložte a uzavřete do nepropustného obalu (zipový sáček), případně označte. Vyplňte **objednávku laboratorního vyšetření**, uveďte **čitelně** všechny požadované údaje, objednávku vložte do samostatného nepropustného obalu (zipový sáček) a přiložte k odebranému vzorku.

U kadáverů selat maximální váhy **do 15 kg** je nutné jako vzorek odevzdat **celý kadáver**.

Vzorky uchovejte v chladu a doručte s řádně vyplněnou žádankou neprodleně na příslušnou KVS, na místo pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce, SVÚ či svozné místo SVÚ.

Provedené vyšetření na africký mor prasat a klasický mor prasat hradí Státní veterinární správa.